



Willkommen bei Alivion!


Wir freuen uns, dass du zu unserer Gemeinschaft gehörst. Mit unseren Kalibrierungsflaschen kannst du dein Gerät jederzeit mühelos kalibrieren. Folge den Schritten in dieser Anleitung, um die optimale Leistung deines Geräts sicherzustellen.

Erfahre mehr auf alivion.ch:
Benutzerhandbuch, Service & Support



Erste Schritte

Du hast ein Nutriion™ Calibration Set erworben. Für eine korrekte Anwendung folge dieser Anleitung.

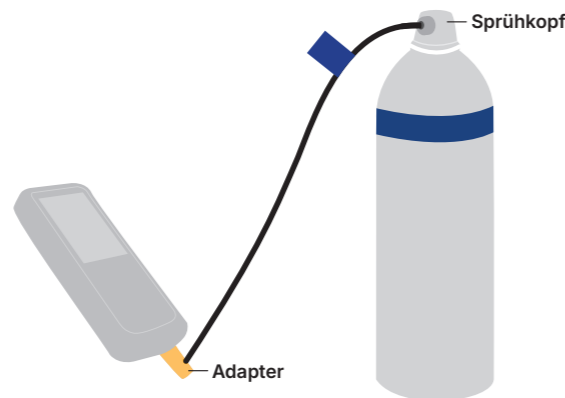

Achtung

Verwende den Probenschlauch mit dem **BLAUEN** Etikett nur mit dem **BLAU** beschrifteten *Calibration Standard 1* und den Probenschlauch mit dem **GELBEN** Etikett nur mit dem **GELB** beschrifteten *Calibration Standard 2*.

Vorbereitung der Kalibrierung

Damit dein Nutriion™ zuverlässig misst, musst du es alle zwei Wochen kalibrieren. Die Kalibrierung erfolgt mit einer Zweipunktkalibrierung, das heisst, du nutzt zwei verschiedene Kalibrierungsstandards nacheinander. Das Gerät informiert dich automatisch, wenn eine neue Kalibrierung erforderlich ist.

Befolge dann die folgenden Schritte:

1. Schalte dein Nutriion™ ein.
2. Gehe ins Gerätemenü und wähle *Einstellungen* → *Kalibrierung*.
3. Das Gerät führt dich durch die einzelnen Schritte. Lies dennoch diese Anleitung sorgfältig durch.
4. Bereite die Kalibrierungsstandards vor: Schraube die Metallschutzkappe von den Flaschen ab.
5. Nimm die beiden Probenschläuche aus der Verpackung.



Achtung

Bitte behandle den Probenschlauch mit Vorsicht. Halte nur den orangefarbenen Adapter des Anschlusses fest, wenn du ihn in das Gerät einführst oder entfernst.

Durchführung der Kalibrierung

Kalibrierungsstandard 1

Flaschenaufbau vorbereiten: Verbinde nun den Probenschlauch mit dem **BLAUEN** Etikett sowohl mit dem Nutriion™, als auch mit dem *Calibration Standard 1*, der **BLAU** beschriftet ist. Der weisse Sprühkopf sollte leicht auf das Flaschenventil gedrückt werden, als wäre es eine Sprühdose. Stecke den orangefarbenen Adapter in die Öffnung des Nutriion™, in die normalerweise das Mundstück eingesetzt wird. Sobald alle Komponenten korrekt positioniert sind, befolge die Anweisungen auf dem Nutriion™-Display.

Sobald alles angeschlossen ist und das Nutriion™-Display dich dazu auffordert, drücke den Sprühkopf senkrecht bis zum Anschlag und halte ihn gedrückt.

Ein Timer zählt nun auf dem Display abwärts – halte den Sprühkopf die gesamte Zeit gedrückt. Lasse ihn sofort los, sobald der Timer abläuft. Das Gerät beginnt nun mit der ersten Auswertung.

Kalibrierungsstandard 2

Während das Gerät die erste Kalibrierung durchführt, bereite die zweite Kalibrierung vor: Verbinde nun den Probenschlauch mit dem **GELBEN** Etikett mit dem *Calibration Standard 2*, der **GELB** beschriftet ist. Schliesse ausserdem den orangefarbenen Adapter an das Gerät an. Sobald das Gerät bereit ist und dich dazu auffordert, den Sprühkopf herunterzudrücken, wiederhole den Vorgang wie beim blauen *Calibration Standard 1* beschrieben.

Weitere Information findest du im Nutriion™ Benutzerhandbuch unter alivion.ch.

Lagerung

Achte darauf, dass die Kalibrierungsstandards vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind und 50 °C nicht überschreiten. Während der Lagerung ist das Entfernen der Probenschläuche von den Flaschen nicht erforderlich.



Am Ende seiner Lebensdauer darf dieses Produkt nicht als regulärer Abfall entsorgt werden. Gib es stattdessen bei einer Entsorgungsstelle ab.